











**TAMPA DO ASSENTO SANITÁRIO  
SOUPLESS'**

Manual de Instruções – DISPOSITIVO MÉDICO

**REFERÊNCIAS: 811078 - 811126**



## SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

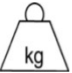	Endereço do fabricante		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

# MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

## IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.


Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar um andador. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais adequada para você.

Distribuidor: este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.

## DESTINO DO PRODUTO

O elevador do assento sanitário foi projetado para facilitar o acesso ao vaso sanitário. Este dispositivo médico permite a utilização independente da sanita por pessoas com mobilidade reduzida, com dificuldades de equilíbrio e/ou dificuldade em sentar-se e levantar-se.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

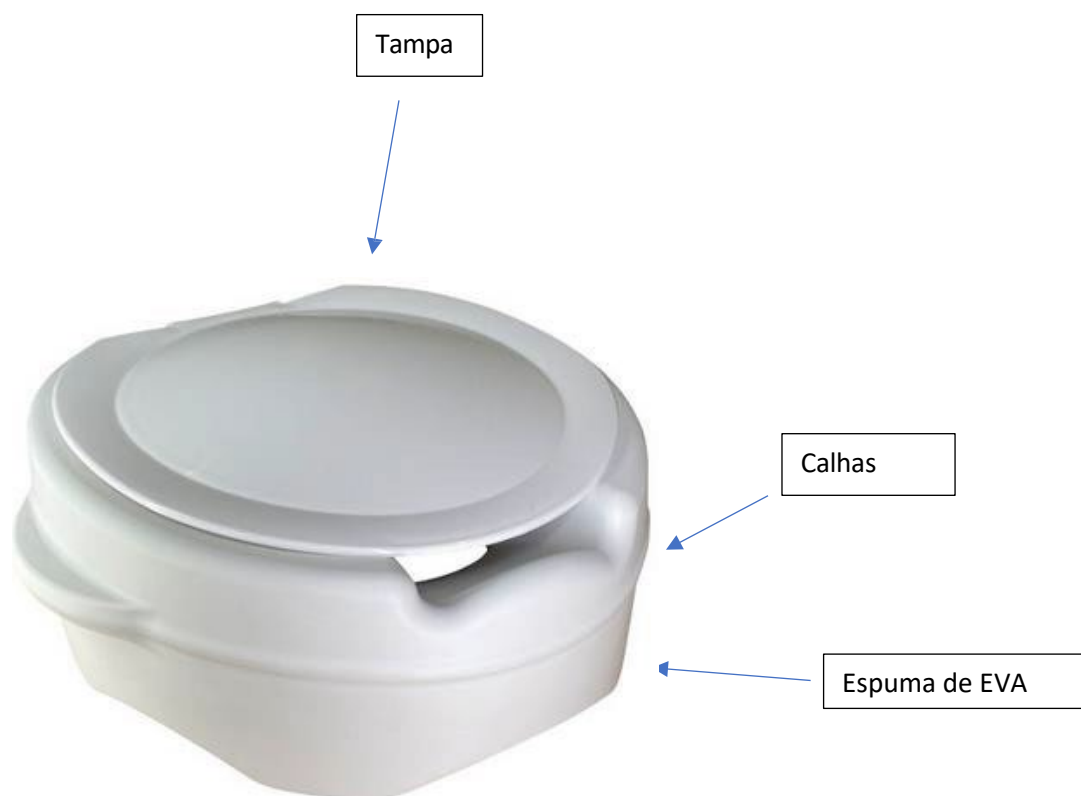

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

Não exceder o limite máximo de peso de 185 kg.

Consulte sempre o seu revendedor especializado para instalar este produto e aprender a usá-lo corretamente. Evite a inclinação excessiva da parte superior do corpo para os lados, frente ou costas. Risco de tombamento.

Não se sente na capa (para modelos equipados com uma).

Não guarde no exterior, e não deixe sob luz solar direta (cuidado para não deixá-lo dentro de um carro em pleno sol!). Não use ao ar livre, use apenas no vaso sanitário.

Não utilizar para outros fins que não os pretendidos: Não se ajoelhe nem fique de pé sobre o produto. Respeite sempre os limites de peso indicados no rótulo ou nas instruções.

Não modifique este produto. Se forem necessárias reparações, utilize apenas peças originais. Apenas pessoal qualificado está autorizado a reparar este produto.

Depois de montar e instalar o produto, certifique-se de que ele está estável no vaso sanitário antes de usar. Em caso de não utilização prolongada, solicite que o seu produto seja verificado pelo seu revendedor especializado.

Verifique sempre a estabilidade antes de utilizar.

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra o utilizador e/ou o doente.

Não utilizar em caso de:

- Demência
- Perturbações significativas do equilíbrio
- Incapacidade de manter uma posição sentada

A instalação deste produto deve ser realizada apenas por pessoal qualificado. O ajuste inadequado pode levar a mau uso e acidentes. Este artigo destina-se a elevar a altura da sanita para mais fácil ficar de pé (+11cm).

Sob nenhuma circunstância você deve usar este produto se você acredita que há um risco de queda. Não hesite em perguntar ao seu concessionário em caso de dúvida.

## UTILIZAÇÃO

1- Levante o assento e a tampa do vaso sanitário.

2- Encaixe o riser WC sobre a tigela.

3- Verifique se os lábios se estendem dentro e fora da tigela. Para sua própria segurança, não utilize em caso de dúvida.

4- Verifique a estabilidade antes de usar.

5- Para remover o produto, desenrosque-o puxando-o para cima. Para substituir, repita o passo 1.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe regularmente o elevador do assento sanitário com um desinfetante não clorado e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou à base de solventes.
- Seque com um pano limpo, seco e macio.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade no elevador.
- Em caso de avaria, consulte um concessionário autorizado.
- **Lista de verificação :**

Para manter o produto em boas condições, verifique antes de cada utilização e verifique regularmente o

seguinte:

Confira o artigo	A qualquer momento	Semanalmente
Estado da cobertura		X
Estado da espuma e das calhas		X
Limpeza	X	

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

## ARMAZENAGEM



**A inobservância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de prejuízo grave.**

Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.

Armazenar em local seco e temperado.

Protegido por embalagens, longe de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado). Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões globais	Largura 41 x Profundidade 44 x Altura 16 cm - Abertura central: 26 x 21,5 cm
Peso	811078 - 2,5 kg 811126 - 2 kg
Carga máxima	185 quilogramas

## PERÍODO DE UTILIZAÇÃO


A expectativa de vida deste produto é de 3 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

## GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



**Identidades – ZA Pole**  
**49 Bd de la Chanterie**  
**49124 São Bartolomeu d'ANJOU**

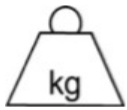

**Poids máxima autorisé Peso**  
**máximo autorizado**  
**185 quilogramas**

