


RELEVE BUSTE – 823039

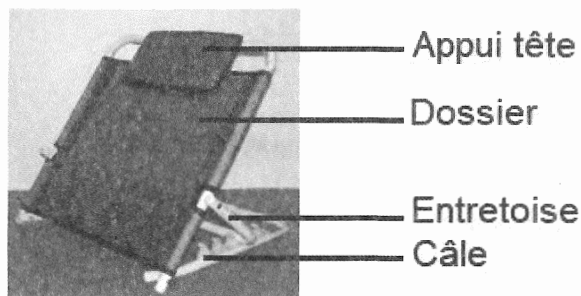

Le relève buste 823039 est un moyen fantastique d'adopter une position assise au lit. L'angle du dossier est ajustable afin de vous procurer le meilleur confort. Le dossier se replie pour occuper un minimum d'espace pour le rangement et le transport.


Le dossier doit être placé et utilisé sur un matelas, par-dessus les draps. Il convient à un seul utilisateur à la fois. L'appuie-tête est fixé au dossier à l'aide de bandes à scratch et peut être retiré si désiré. Pour retirer l'appuie-tête, tirez simplement dessus jusqu'à ce que le scratch cède. L'appuie-tête peut être rangé derrière le dossier.

Veuillez noter que l'appuie-tête peut être retiré de la partie avant mais il demeure relié au dossier à l'aide d'une bande de tissus. N'essayez pas de retirer complètement l'appuie-tête de l'ensemble.


IDENTITÉS
matériel de rééducation et d'autonomie

Instructions Pour l'assemblage :

Posez le dossier à plat sur le matelas. Tirez le haut du dossier (comme indiqué sur la photo ci-dessous). Lorsque l'angle du dossier est convenable, coincez l'entretoise dans une des cales de plastique à la base du dossier. Assurez-vous que le dossier est solide avant de l'utiliser.

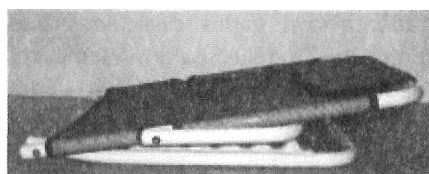

ENCOSTO REGULÁVEL – 823039

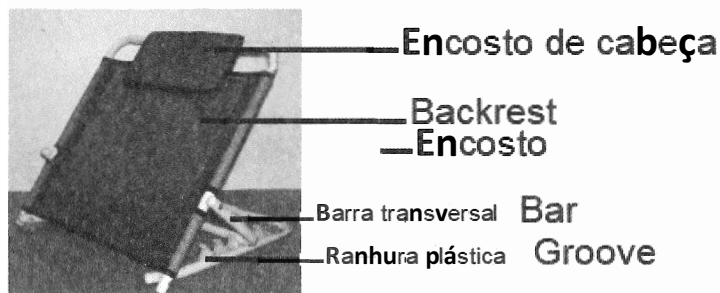


O encosto da cama é uma ótima maneira de permitir a qualquer pessoa sentar-se direito na cama. Para seu conforto, existem múltiplos ajustes que aumentam ou diminuem o ângulo do encosto. O encosto também se dobra para cima numa forma compacta para armazenamento e transporte. O encosto deve ser colocado e utilizado em cima do colchão e dos lençóis da cama. É adequado apenas para um utilizador de cada vez. O encosto é fixado no encosto por correias de velcro e pode ser removido conforme desejado. Para remover o apoio de cabeça, basta puxar para cima no apoio de cabeça até que o velcro seja libertado. O encosto para a cabeça pode então ser guardado atrás do encosto. Note por favor - o apoio de cabeça pode ser removido da zona frontal do encosto, mas permanece preso ao dispositivo por uma correia de tecido. Não remova completamente o apoio de cabeça do dispositivo.

IDENTITÉS
matériel de rééducation et d'autonomie

Montagem de estruturas::

Colocar o encosto no colchão. Puxar para cima na parte superior do encosto (como mostra a fotografia abaixo). Quando o encosto estiver num ângulo confortável, empurrar a barra transversal para um dos sulcos de plástico na base do encosto. Assegurar-se de que o encosto é mantido em posição segura antes de ser utilizado.

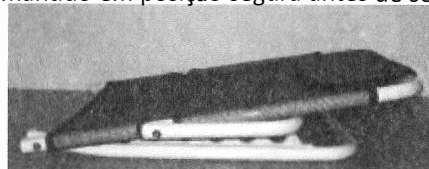

Para Dobrar o Encosto: Puxar para cima no topo do encosto. Retirar a barra transversal da ranhura e dobrar o encosto para baixo

Made in China

IDENTITES : Boulevard de la Chanterie ZA Pôle 49
49124 St Barthélemy d' Anjou -France