

Finalidade:

Por vezes referido como um aro de cama, Gaiola ou "elevador de lençóis", o aro de cama é um acessório que pode ser utilizado para aliviar vários tipos de dor. É frequentemente utilizado na presença ou prevenção de feridas de pressão, especialmente nos idosos: impede o contacto entre os lençóis e cobertores e as pernas. Contudo, uma estrutura de cama também pode ajudar alguns pacientes com dores de pele, problemas de circulação, dores nas articulações ou inflamações. Muitas pessoas que estão temporariamente acamadas ou imóveis usam um elevador de cama após uma cirurgia, por exemplo, colocação de prótese, ou durante a recuperação de uma fratura. Um pequeno aro de cama pode ser útil para permitir a circulação de ar na cama se esta estiver húmida.

Características:

Estrutura metálica pintada de branco. O seu material suporta o peso dos lençóis e edredons. Pode ser utilizado tanto em camas articuladas como em convencionais, adaptando-se a ambas, garantindo um uso confortável.

Dimensões: largura 54 x altura 32 cm.

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 823040

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante/Distribuidor: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpar o arco com água morna e um detergente neutro. Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter seco

Instruções de utilização:

Um aro de cama é uma estrutura pequena e simples que se instala facilmente na cama. Basta posicioná-lo sobre o paciente, geralmente sobre a anca, aos pés ou joelhos, para levantar o lençol ou cobertor. Pode suportar perfeitamente o peso de um lençol e edredão.

Imagens do Artigo:

