

Finalidade:

Tala de flexão activa de dedo. A tala vai da cabeça da falange proximal até à articulação interfalângica distal. Fornece tensão moderada na articulação interfalângica proximal para colocá-la numa posição flexionada. A falange distal é deixada livre para permitir o uso funcional do dedo.

Indicado para casos de lesão por esmagamento. Deformidade e reabilitação dos dedos da mão.

Características:

Feito de arame forrado para maior conforto. Permite dobrar a articulação a cerca de 80°. A tensão pode ser ajustada através de uma ligeira flexão do material.

Almofada de dedo para maior conforto. Pode ser usado nos dedos adjacentes. A tensão pode ser ajustada dobrando levemente o material.

Dimensões: TAMANHOS de medição dorsal em cm de MCP a IFD

XS – (<3,5)

S – (3,5 a 4,4)

M – (4,5 a 5,4)

L – (5,5 a 6,9)

XL – (>7)

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação: Classe I

Modelo: IF601

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Marca: EMO

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lave manualmente em água morna com detergente neutro. Seque ao ar livre antes de usar. Manter longe da luz solar.

Instruções de utilização:

O artigo deve ser adaptado por um técnico ortopédico ou médico que esteja familiarizado com o uso e a finalidade deste artigo. A escolha correta do tamanho é essencial para obter a máxima eficiência do tratamento.

Não use diretamente em cicatrizes abertas ou vermelhas sem estar devidamente protegido.

Imagens do Artigo: