

Finalidade: As embalagens libertam calor húmido penetrante profundo. O calor húmido é mais intenso e mais eficaz do que o calor seco normal. Por baixo de uma capa agradável e amiga da pele, micro esferas especiais armazenam humidade pura e libertá-lo quando micro-ondas. O efeito pode ser sentido e visto.

Características:

Cobertura de poliéster com enchimento de espuma de PU, micro esferas, sem cheiro, sem pó, sem látex.

Medida: 32,5 x 19 cm

Cor: Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 150.200

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Nunca deixar o saco aquecer no microondas sem supervisão. Guardar longe da luz solar e quando não está a uso guardar. Se necessário, limpar o produto com uma toalha húmida, não humedecer ou molhar completamente. Não lavar na máquina de lavar roupa.

Instruções de Utilização:

Aquecimento simples e incremental no microondas: Colocar o produto no microondas limpo e programe para aquecer, durante 1 minuto, a 600 ou 800 Watt. Retire do microondas e teste ao toque. Se desejar calor adicional, continuar a aquecer em incrementos de 20 segundos. Aquecimento máximo total de 2 minutos. Este tempo não deve ser excedido. Fornece calor durante cerca de 30 minutos. Caso seja necessário dobrar o artigo para introduzir no microondas, deve ser dobrado com bastante folga. A meio do aquecimento deve parar e virá-lo ao contrário e continuar a aquecer o restante tempo. NÃO EXCEDER O TEMPO TOTAL DE 2 MINUTOS.

O enchimento fino e sem látex do Hydrotemp® da SISSEL®. Adapta-se aos contornos do corpo. SISSEL® Hydrotemp® pescoço e O SISSEL® Hydrotemp® large com cinto garante total mobilidade durante a utilização.

- Tensão muscular, -dores, artrite
- Alívio de dores nas costas, pescoço e ombros
- Dores de cabeça de tensão
- Alivia constipações e dores menstruais

Também uso alternadamente com embalagens frias para aliviar a inflamação aguda da bursite.

Imagens do Artigo:

