

SUPORTE ANTEBRAÇO TRANSPIRÁVEL SPB200 GeriMais

Finalidade:

Suporte antebraço Indicado para: Traumatismo do ombro e do braço, subluxação, lesões dos tecidos moles (queimaduras, infeções), sequelas inflamatórias ou dolorosas, pós-operatório

Efeitos: Controlo da mobilidade do membro superior, apoia e fixa a extremidade superior numa determinada posição. Distribui o peso do braço por toda a ortose, incluindo o cotovelo. Suporta o peso do braço, evita edema distal ou inchaço dos dedos e do cotovelo.

Características:

Tecido extremamente respirável. Fácil ajuste e limpeza. Com laço para facilitar o descanso do polegar e a posição do pulso. Ajuste fácil com fivela de libertação rápida. Almofada de ombro protetora, Compatível com definição e na extremidade superior em uma determinada posição.

Artigo testado em conformidade com as normas europeias aplicáveis, Oeko-Tex Standard 100: Textil rótulo ecológico, garante a ausência de substâncias nocivas à saúde.

Dimensões:

T.S (<35), T.M (35-40) , T.L (>41).

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: SPB200

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Entrar plenamente no apoio de antebraço. O cotovelo deve atingir o topo do saco e da articulação de pulso, deve estar dentro do suporte, Passe a fita por trás do seu pescoço e ajuste.

