

## Finalidade:

Estabilização da articulação do punho.  
Estabilização das articulações metacarpais.  
Melhora a propriocepção. Calor terapêutico.  
Indicado para casos de entorse, síndrome do Túnel cárpico, Tendinite, Artrose, Artrite, dor não específico no pulso, tratamento pós operatório.

## Características:

Tecido térmico, elástico e extremamente respirável.  
Incorpora talas palmar e dorsais removíveis de alumínio confortável.  
Ajuste muito fácil por velcro na palma e no antebraço.  
Bilateral.

## Dimensões:

Tamanho: bilateral.  
Contorno do pulso em cm:  
S (13-15cm),  
M (15-18cm);  
L (18-21cm);

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ521

**Marca:** Ottec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

## Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

## Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

## Instruções de utilização:

A tala deve ser adaptada por um médico ou protésico. A escolha correta do tamanho e o seu ajuste é crucial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida do artigo. Adaptar as cintas/tiras de velcro à morfologia do paciente.

## Imagens do Artigo:

