

Finalidade:

Cinta Sacrolombar feita com tecido elástico e altamente respirável e elástica que permite distribuir a carga e apoiar a área. Incorpora quatro varetas flexíveis. Construção perfeita sem costuras: evitar uma pressão excessiva e maximiza a leveza. Dois grandes laços para fácil posicionamento através de microvelcro.

Indicado para: Dores lombares agudas e de esforço, Síndrome de Facet, Protrusão de disco, Hipotonia muscular, Reabilitação postural.

Características:

Cinta Sacrolombar feita com tecido elástico e altamente respirável.

Duas pegas elásticas leves e respiráveis para fácil colocação. Fixação ajustável de Velcro®.

Sem costuras

Sem látex: hipoalergénico.

Dimensões:

S : 65-80cm

M : 80-95 cm

L : 95-110 cm

XL : 110-125 cm

XXL: 125-140 cm

3XL : 140-155 cm

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ200

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Colocar o cinto na área lombo-sacra na altura correcta para uso. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdómen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

Imagens do Artigo: