

Finalidade:

Urinol Masculino de plástico com pega e tampa. Recolha de líquidos biológicos para tratamentos químicos, clínicos e/ou microbiológicos subsequentes. Produto dirigido a operadores profissionais de hospitais, lares de idosos e/ou casas de repouso. O urinol é prático e seguro para depositar urina e, em seguida, esvaziar com total segurança.

Características:

Poliétileno. Material não tóxico, resistente. Forma anatómica.

Capacidade: 1000ml

Cor: Branco com tampa azul claro.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 801027

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água e sabão após cada utilização e secar com uma toalha.

Manter longe de fontes de calor directa.

Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.

Instruções de utilização:

Para instalar um urinol, abra as pernas e coloque o urinol entre elas. Se possível, ajude o utilizador a sentar-se numa posição confortável para facilitar a utilização.

Nota: Inspeccionar cuidadosamente todas as peças quanto a fissuras/quebras antes da utilização

Imagens do Artigo: