

## Finalidade

É importante adaptar a sua casa quando tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm muitas vezes problemas de mobilidade e passam, por isso, muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

## Características:

Duplo motor, apoio de pés extensível.

Função de massagem vibratória e aquecimento lombar.

Função de elevação e reclinção eléctrica.

Peso máximo: Utilizadores até 150 kg

## Medidas:

Largura do assento: 50cm;

Profundidade do assento: 53cm;

Altura do assento: 48cm;

Largura total: 70cm;

Profundidade total: 88cm;

Altura do encosto: 68cm;

Comprimento total: 169cm;

Altura da cadeira: 112cm;

Altura do apoio para os pés: 40,5cm;

Elevação da cadeira: 30º

Ângulo de inclinação: 170º

Tamanho da embalagem: 79x76x65cm;

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Cinzento escuro

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** EV2002 Pacific

**Marca:** EvoluXion

**Mandatário:** Evoluxion Health

**Morada:** Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

## Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

## Manutenção e conservação:

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço.

Certifique-se de que não existem cabos presos.

## Instruções de utilização:

A cadeira é entregue totalmente montada, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

As quatro rodas da cadeira tocam no chão quando a cadeira está na posição sentada (a cadeira pode ser deslocada). Os dois rodízios dianteiros são bloqueados quando a função de elevação é utilizada.

## Imagens do produto:

