

**Finalidade:**

É importante adaptar a casa quando se tem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida. Estas pessoas têm frequentemente problemas de mobilidade e, por conseguinte, passam muito tempo sentadas. Para tornar a sua vida mais confortável, é muito importante ter um sofá/cadeira adaptado às suas necessidades, quer seja para relaxar ou descansar.

**Características:**

Motor único sem extensão de pé. Peso máximo: Utilizadores até 145 kg.

**Medidas:**

Largura do assento : 49cm;  
Profundidade do assento : 49cm;  
Altura do assento : 49cm;  
Largura total: 75cm;  
Profundidade total : 82cm;  
Altura do encosto: 70cm;  
Altura do apoio de braços: 18cm;  
Altura da cadeira: 107cm;  
Tamanho da embalagem: 83x76x65cm;

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Camel

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** EV2001 Indico

**Marca:** EvoluXion

**Mandatário:** Evoluxion Health

**Morada:** Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7

160-477 Lisboa, Portugal

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e conservação:**

Não exceda o peso máximo recomendado para o utilizador.

Tenha muito cuidado na presença de crianças ou animais de estimação.

Não permita que as crianças se coloquem debaixo da cadeira, utilizem a cadeira ou brinquem com a cadeira, uma vez que tal pode causar ferimentos quando o apoio de pernas se dobra para baixo.

Não mova a cadeira quando esta estiver numa posição deitada, quando a cadeira estiver ligada à fonte de alimentação e/ou em serviço. Certifique-se de que não existem cabos presos.

**Instruções de utilização:**

A cadeira é entregue totalmente montada, com exceção do encosto, que é fácil de montar na cadeira.

As quatro rodas da cadeira tocam no chão quando a cadeira está na posição sentada (a cadeira pode ser deslocada). Os dois rodízios dianteiros são bloqueados quando a função de elevação é utilizada.

**Imagem do produto:**