

Finalidade:

Imobilizador de pulso com três talas de alumínio amovíveis: Palmar, cubital e radial.

Características:

Imobilizador de pulso com três talas de alumínio amovíveis: Palmar, cubital e radial.

Fabricado por microfusão sem costuras para evitar excesso de pressão e arranhões.

Tecido técnico com máxima resistência, respirabilidade e espessura mínima. Colocação e ajuste com uma só mão. Fecha com micro velcro.

Bilateral**Dimensões (contorno do pulso):**

S (14 a 18 cm);

L (18 a 22cm)

Cor: Preto e branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ701

Marca: Manugrip

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO
MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

A ortótese deve ser adaptada pelo protésico ou pelo médico a cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para alcançar a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da ortótese.

Indicado para: Imobilização controlada da articulação. Instabilidade, Síndrome do túnel carpico. Pós operatório, Osteoartrite degenerativa, entorse recorrente no pulso.

Ideal para estabilização, imobilização. Permite a mobilidade total dos dedos.

Imagens do Artigo: