

**Finalidade:** Bengala ajustável serve como auxiliar de marcha a pessoas com mobilidade reduzida.

**Características:** Dobrável em alumínio anodizado com pontas antideslizantes - ajustável em altura a cada 2,5cm. Cabo em madeira. Peso máximo : 110kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** RP146

**Marca:** Mopedia - Brio

**Dimensões:** 79 a 102 cm

**Declaração de Conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Verifique o desgaste da ponta de borracha. Limpeza: Use apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover mais difícil terra. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca use jato Água ou vapor lavagem máquina.

**Instruções de Utilização:** Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas. Pressione o botão, deslize a bengala e leve-a a corresponder aos orifícios na altura exigida e à manobrabilidade do paciente. Coloque o pino no orifício para bloquear a bengala e certifique-se de que o botão está completamente no interior do orifício. Tenha muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.

**Imagens do Artigo:**

