

Finalidade: Banco de casa de banho/duche destina-se a facilitar o sentar de pessoas com deficiência ou com dificuldades de mobilidade durante as operações na casa de banho.

Características: Dimensões: 45 x 45 x 41 -a54 cm. Assento: 48 x 33 x 41 - 54cm, capacidade máxima: 110 kg. Estrutura alumínio anodizado, assento em polietileno de alta densidade, altura ajustável e pontas de borracha antiderrapante.

Cor: Branco

Data de produção: Verificar embalagem

Caixa: 1 unidade

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RS831

Marca: Mopedia

Dimensões: 45 x 45 x 41 -54 cm; Assento: 48 x 33 x 41 - 54cm

Capacidade Máxima: 136 kg

Declaração de Conformidade: Regulamento UE2017/745

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para limpar o produto, utilize apenas um pano embebido em água e seque com um pano limpo seco, ou com água morna e sabão neutro. Se necessário, desinfete o produto com um detergente desinfetante suave.

Instruções de Utilização: Ajuste de altura: Pressione o trinco para ajustar o assento removendo o cano e trazendo-o para os orifícios de acordo com a altura desejada e a manobrabilidade subjetiva do paciente. Reposicione o trinco no orifício para trancar o cano. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura. Coloque o assento sobre uma superfície plana e regular. Verifique a estabilidade do assento antes de utilizar.

Imagens do Artigo:

