

Finalidade: Permitir uma maior segurança e estabilidade, a pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência, durante o duche;

Características: Estrutura de Alumínio (regulável em altura), assento em polietileno HDPE e ponteiros em Borracha;

Cor: Branco;

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Embalagem: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe I;

Modelo: RS827 / RS829;

Marca: Onda (Moretti);

Dimensões: RS827 - 50x52x(43-53)cm; RS829 – 50x54x(71-81)cm;

Peso Máximo de utilizador: 135kg;

Fabricante: Moretti S.P.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e Limpeza: Para limpar utilize água morna e um sabão neutro. Seque com um pano. Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies metálicas;

Instruções de Utilização: Pressione o trinco, empurrando ou puxando o tubo, trazendo-o para os orifícios de acordo com a altura desejada. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura. Coloque o banco/cadeira sobre uma superfície plana e regular. Verifique a estabilidade da cadeira antes de utilizar.

Imagens do Artigo:



RS827



RS829