

## MESA REGULÁVEL DE COMER NO LEITO PREMIUM TB100

**Objetivo:** Mesa auxiliar multifuncional, compacta e versátil, adequada para utilização junto à cama, sofá ou outros locais onde seja necessária uma superfície de apoio móvel. Possui ajuste de altura e inclinação do tampo, permitindo a adaptação às necessidades do utilizador e proporcionando maior conforto durante atividades como refeições, leitura, escrita ou utilização de dispositivos eletrónicos. Equipada com quatro rodas, facilita a deslocação entre divisões e o posicionamento conforme necessário.

### Características:

Aço epóxi, regulação da rotação

Tampo da mesa: 60 x 38,5 , regulável em altura, 2 rodas com travões

Função: Mesa móvel, superfície regulável em altura, concebida para ser utilizada com vários tipos de camas e cadeiras.

Peso máximo suportado: 15 kg.

**Medidas:** 62 x 62 x 72 – 110 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Wood

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** TB100

**Marca:** Evoluxion Home

**Manutenção e armazenamento:** A mesa deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos e deformações na estrutura da mesa;
- Se as rodas giram livremente e permanecem firmemente fixadas;
- Parafusos e elementos de fixação quanto a desgaste, afrouxamento ou ausência;
- Se o mecanismo de ajuste de altura e/ou inclinação trava corretamente na posição selecionada;
- Se existem folgas excessivas ou instabilidade durante a utilização.

### Instruções de utilização:

1. Retirar todas as peças.
2. Montar todos os parafusos de acordo com a seta e fixá-los bem.
3. Rodar o botão menor para destravar o mecanismo de inclinação do tampo. Ajustar o ângulo desejado e, em seguida, rodar o botão no sentido contrário para travar o mecanismo.
4. Rodar o botão maior para destravar o mecanismo de ajuste de altura. Ajustar o tampo para a altura desejada e, em seguida, rodar o botão no sentido contrário para travar o mecanismo.
5. Capacidade máxima de peso: 15KGS.
6. Adicionar algum óleo às peças de movimento após algum tempo de utilização.
7. Manter em local seco e fresco, afastado da humidade.

### Imagem do produto:



Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal



+351 925 568 105



export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España



+34 634 058 47



comercial@greenvisco.com