

BANCO DE BANHO EM U BW200

Objetivo:

Banco de banho ajustável em altura com em U e pernas com ventosas antiderrapantes para proporcionar maior estabilidade e maior higiene.

Características:

Alumínio anodizado + assento PE de alta densidade
4 ponteiros de borracha, assento em forma de U,
2 suportes de chuveiro, 2 pegas laterais de apoio
Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.
4 ponteirass antiderrapantes

Medidas: 45 x 33 x 36 - 53 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BW200

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

1. Limpar e desinfetar rotineiramente uma vez por dia pelo pessoal médico ou pelos utilizadores e desinfetar cuidadosamente a cadeira quando mudar de doente.
 2. Não entrar em contacto com ácidos e álcalis fortes para evitar a corrosão.
- O produto deve ser armazenado a uma temperatura e humidade normais e mantido seco.

Instruções de utilização:

1. Antes da utilização, ajustar o assento da banheira a uma altura adequada, de modo que os quatro pés assentem no chão sem problemas.
2. Verificar se o encosto está bem instalado e se há oscilação durante a utilização. Sente-se no meio da cadeira de duche durante a utilização.
3. A altura da cadeira de banho pode ser regulada. Ao ajustar a altura, primeiro empurre os berlines para baixo e depois puxe-os para baixo. Basta ajustar a altura para a sua própria utilização.

Imagem do produto: