

Finalidade:

Dispositivo de Estimulação Respiratória. Sistema inovador de incentivo à respiração através da inalação. É composto por uma base e um corpo de três câmaras com três esferas de cor e peso diferentes no interior. Ao inalar, as três esferas são elevadas a um nível proporcional à força da inspiração realizada. Exercícios respiratórios para resistência, para tratamentos no período pós-operatório e para crises de asma ou bronquite. Ideal para prevenção de infecções respiratórias e bronco-pulmonares em idosos, acamados, crianças e outros com necessidades específicas. Por incitar a inspiração e expiração profunda, expande os alvéolos pulmonares e exercita os músculos respiratórios.

Características:

Especificações técnicas

1 corpo transparente com três câmaras em copolímero e poliestireno atóxico

1 base

3 bolas em polipropileno atóxico de cores e tamanhos diferentes (esfera vermelha 600 cc, esfera amarela 900 cc e esfera verde 1200 cc por segundo)

1 tubo com bocal em polietileno

Modelo: ST586;

Peso do artigo: 0,170 Kg

Dimensões: 14,3 x 14,5 x 7,3 cm

Cor: Branco e transparente

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Diretiva 93/42/CEE – Dispositivo médico

Classificação: Classe I

Marca: (Moretti);

Fabricante: Medinet S.R.L - Via Canova 19/a – 20145 Milano – Itália

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e Instruções de Utilização:

Manutenção e Armazenamento

Removível para uma limpeza mais fácil.

- 1) Inspire profundamente usando o bocal apropriado para levantar o máximo de bolas possível
- 2) Mantenha a inspiração pelo maior tempo possível
- 3) Expire soltando o bocal. Repita o processo

Imagens do Artigo:

