

Finalidade: Estetoscópio de cabeça única e plana em alumínio anodizado. É adequado especialmente para a medição da pressão. A cabeça plana pode ser facilmente inserida sob a braçadeira do esfigmomanômetro;

Características: Material de alumínio;

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Preto;

Caixa: 1 unidade;

Declaração CE: Diretiva - 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: DM130N;

Marca: Logiko (Moretti);

Dimensões: diâmetro da cabeça 45mm, altura da cabeça 10mm;

Fabricante: MORETTI S.p.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto Reg. Imp. Arezzo 3932 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Antes de qualquer utilização, controle o estado das pontas dos ouvidos. Uma vez desgastado, as pontas dos ouvidos devem ser substituídas para evitar danos no canal auditivo. Evite calor e frio extremo. Evite esterilização a quente. Os estetoscópios podem ser limpos com álcool ou água com sabão;

Instruções de Utilização:

1. Ajuste a tensão de mola do auricular às suas necessidades;
2. Para reduzir a tensão da mola no auricular, segure cada protetor auricular na curva perto da ponta do ouvido e afaste-se gradualmente até se esticar completamente;
3. Para aumentar a tensão da mola, agarre o auricular com uma mão onde os auriculares entram na tubagem e aperte até que a tubagem no auricular toque a outra;
4. Para rodar a cabeça dupla, basta manter o tubo Y em correspondência com a cabeça e rode-o 180° até ouvir CLICK.

Imagens do Artigo:

