

Silicoplant

Ortóteses de gel viscoelásticas

Especialistas em ortopedia

PG510
Protetor de joanete em tecido elástico

Protetor de gel joanete



COMPRIMENTO: 8.5MM LARGURA: 8.7MM

MADE IN SPAIN



7



LSD IEL E96 vE+ I sa·owa· MMM eu sa·owa@owa
uieds (eioua1·A) ejpod,ed 00/9v ·ov 'eia; enosed ·1 ap ou,weJ-
"TS ·SV81D d01 0 081D V1 S30VDIIV183dS3 01'13

PG510 Protetor de joanete em tecido elástico

CARACTERÍSTICAS: Luva de gel fabricada em tecido elástico como lado protetor interior Hallux Valgus.1 Unidade.

INDICAÇÕES: protetor lateral para hallux valgus.
EFEITOS: Alívio lateral do hálux valgo. Proteção contra a fricção e pressão lateral no osso.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO: Lave com água fria, água neutra e deixe o ar secar. Conservar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

COLOCAÇÃO: A escolha correta do tamanho é fundamental para alcançar a máxima eficácia do tratamento, bem como para promover a vida útil da ortese. Coloque a órtese de acordo com a imagem na folha de apresentação.

NORMATIVA: Este Dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (2017/1745 da UE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre pro: Dispositivos médicos e respetivas regras nacionais. Foi realizada uma Análise de Risco (UNEENISO14971), minimizando todos os riscos existentes. Produtos anile classe I, não estétil, meio não funcional

PRECAUÇÕES: Se você tem uma área cirúrgica, irritação, distúrbio de pele, inchaço, não sofre de qualquer tipo. remova o produto e consulte o médico prescritor profissional de saúde. Não utilize diretamente sobre cicatrizes abertas ou avermelhadas sem proteção prévia. Não Expor a chamas ou a fontes de calor a temperaturas muito elevadas. A órtese deve apertada, mas não deve ser excessivamente comprimida. Inspeção regularmente o produto para se certificar de que funciona corretamente. Não aperte muito. Verifique regularmente se a circulação está comprometida. Em caso de dúvida sobre a secção de tamanho, escolha sempre o tamanho maior. O utilizador deve examinar regularmente o produto para garantir que está em perfeitas condições e para garantir o seu correto desempenho. Não utilize o produto, se o mesmo estiver danificado.

AVISOS: a ferramenta é coordenada
Atas f d i c a t i o n s . S e r e 0 0 1 f i e n d a u s e i t W e s i t X j e x e c u t a r a p e n a s p a c i e n t e . P a r a a c o l o c a c i o d e l a o r t h o s i s s i g a a s i n s t r u c c o e s d o f a b r i c a n t e . S a s i n d i c a c i o e s o u r e v e r s a o d o p r e s c r i t o r d o p r o f i s s i o n a l d e s a ú d e . P a r a u m a a p l i c a c i o p e r s o n a l i z a d a , c o n s u l t e u m e s p e c i a l i s t a O e s p e c i a l i s t a é r e s p o n s á v e l p o r f o r n e c e r a s i n f o r m a c o e s n e c e s s á r i a s p a r a g a r a n t i r q u e o u s u á r i o f i n a l s e j a r e s p o n s á v e l p e l a c o l o c a c i o

utilizar el producto de manera segura. Producto apto para esterilización. Mantener fuera del alcance de niños. Para

inación de producto utilizar el contenido de residuos sólidos. Para inación del envase, dependiendo del material, este utilizar el contenedor de plástico

contenedor de plástico. todo caso debe cumpl rictamente normalva del is. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante o a la autoridad competente del Estado miembro que estén establecidos para el usuario cliente.

Data da última revisão 5/2024 V.01

FABRICANTE

[J]

CONSULTAR INSTRUÇÕES

DATA DE FABRICO [doente] CÓDIGO LOTE

[MQ] PRODUTO SANITÁRIO [doente] NÚMERO POR REFERENCI

CADUCIDADE CE CONFORMIDADE CE

MANTER SEGO UM DOENTE. MÚLTIPLOS.

t4'0.,

RECICLAGEM NÃO CONTÉM LÁTEX



PONTO VERDE

-1'

MANTENHA DISTÂNCIA DE O LUZ

2006AM653
AITEK

