

## ALMOFADAS ANTI-ESCARAS EV600 – EV605 – EV610 – EV615

### Objetivo:

Prevenção de escaras e, em casos específicos, como auxiliar no seu tratamento em pessoas que passam longos períodos sentadas. Outras aplicações: recuperação pós-operatória e pós-parto, problemas de coluna e de cóccix, hemorróidas e problemas anorectais. Este tipo de almofada, com a sua variedade de formas, é uma opção cómoda e versátil para muitas situações.

### Características:

Cobertura: tecido de poliéster bi-elástico com revestimento de poliuretano. Este tecido garante o máximo conforto e higiene.

Núcleo/enchimento: fibra oca encaracolada e conjugada.

Correias: Inclui correias para uma fácil fixação à cadeira de rodas e a outros assentos.

Prevenção de escaras. Risco - Médio / Baixo

Peso máximo do utilizador: 80kg

### Medidas:

EV600 – 49 x 45 x 11 cm

EV605 – 49 x 45 x 11 cm

EV610 – Ø49 x 11 cm

EV615 – 49 x 47 x 11 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** EV600, EV605, EV610, EV615

**Marca:** EcoSoft

### Manutenção e armazenamento:

Pode ser lavada à mão em água fria, utilizando produtos não abrasivos ou na máquina, utilizando um programa para roupa delicada, a frio e sem centrifugação. Recomenda-se a utilização de uma rede de segurança para evitar a deformação da capa durante a lavagem. Secar em local plano; Não utilizar lixívia; Não passar a ferro.

### Instruções de utilização:

Colocar a almofada sobre uma superfície firme e estável (cadeira, sofá ou cadeira de rodas). Não utilizar em superfícies demasiado macias ou instáveis, pois isso pode afetar a sua eficácia.

### Imagem do produto:

EV600



EV605



EV610



EV615

Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)