

Finalidade:

Andarilho é uma ajuda com dois braços adequada para apoiar e/ou ajudar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.

Características:

Dobrável de alumínio anodizado leve com pegas anatómicas, 4 rodas, 2 rodas giratórias na frente rodas frontais. Sistema de autobloqueio nas rodas traseiras. Fechadura de 1 botão. Altura ajustável a cada 2,5 cm.

Tubo - Diâmetro do alumínio 22 mm

Pegas: Polipropileno

Ponteiras: Borracha antiderrapante

Carga máxima: 130 Kg

Dimensões: Medição na medida mais baixa - 66 x 55 x 62 cm

Medição na medida mais alta 69 x 59 x 64 cm

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Cinzento;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: RP738;

Marca: Mopediá (Moretti);

Fabricante: Moretti S.p.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda.;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujidade mais difícil. Seque bem antes de usar;

Instruções de Utilização:

1. Com o braço estendido, o cabo do andarilho deve estar à altura do pulso. Com a mão apoiada na pega, o cotovelo deve estar dobrado 20°-30°;
2. Para transferir o paciente da cadeira de rodas para o andarilho, certifique-se de que as rodas da cadeira de rodas e andarilho estão bloqueadas;
3. Andarilho com rodas: Para caminhar com o andarilho, empurre-o confortavelmente à sua frente, certificando-se de que as quatro pernas, mesmo as equipadas com rodas, estão apoiadas no chão.

Imagens do Artigo: