



MESA DE CAMA SIMPLEX

***Manual de uso* - DISPOSITIVO MÉDICO**

REF. 823155



SÍMBOLO PRESENTE NA ETIQUETA OU NO MANUAL DO USUÁRIO

	Endereço do fabricante		Consulte o manual do usuário
	Data de fabricação		Respeite as orientações de segurança
	Identificação do lote		Conformidade CE
	Referência do produto Código de referência do produto Identificação do produto		Não expor à umidade Evite ambientes úmidos Mantenha protegido da umidade
	Peso máximo recomendado para o usuário		Equipamento médico Produto médico Dispositivo para uso médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

IMPORTANTE

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e mantenha-o guardado para futuras consultas.

Usuário: Caso não consiga ler ou entender algum aviso, precaução ou instrução, procure seu profissional de saúde ou o distribuidor antes de usar este produto, para evitar possíveis riscos e danos.

Consulte seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar um andador. Ele ou ela irá orientar e informar sobre a melhor forma de caminhar para você.

Distribuidor: este manual deve ser entregue a todos os usuários deste produto.

INDICAÇÕES DO PRODUTO

A mesa de cabeceira Simplex é um equipamento médico. Com ela, é possível ler e fazer refeições na cama com total conforto. A altura e a inclinação do tampo podem ser ajustadas para atender às diferentes necessidades ao longo do dia.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA




O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar em ferimentos graves.

- Utilize a mesa de cabeceira apenas conforme indicado neste manual.
- Não ultrapasse o limite máximo de 25 kg.
- Instale a mesa de cabeceira em uma superfície nivelada.
- Guarde o produto em ambiente interno, longe de umidade e poeira.
- Antes de usar, verifique se os controles de ajuste estão funcionando corretamente.
- Confira se todas as peças estão presentes e em bom estado antes do uso. Em caso de danos, entre em contato com o seu distribuidor.
- Siga atentamente as instruções de montagem e certifique-se de que todos os componentes estejam bem fixados antes de utilizar.
- Ative os freios das rodas antes de usar.
- Se alguma peça estiver danificada, quebrada ou desgastada, procure seu distribuidor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO:

Fixe as travessas K e M na estrutura J usando os parafusos L. Confira a posição da travessa de bloqueio das rodas K conforme indicado no diagrama. Aperte os parafusos L. Certifique-se de que as quatro rodas estejam tocando o chão.

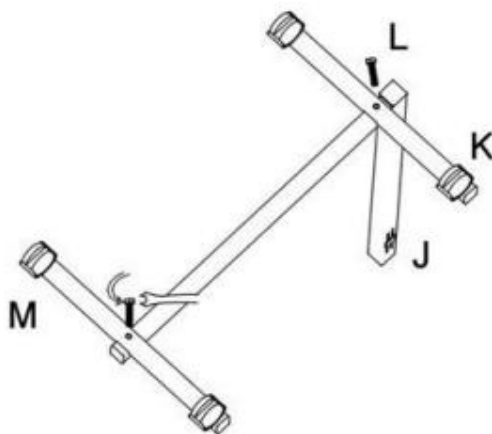


Insira o tubo deslizante C (parte quadrada) na estrutura J e ajuste na altura desejada; depois, aperte a porca de fixação F.

Coloque a haste de apoio B dentro do tubo C (parte cilíndrica) até que a porca de fixação encoste no tubo.

Agora, as duas partes inclinadas estão em contato.

Coloque a arruela de fixação E (com o lado menor no tubo C) e aperte levemente o botão de fixação D.

Observação: A arruela de fixação E deve ser posicionada na placa de travamento A de forma inclinada.

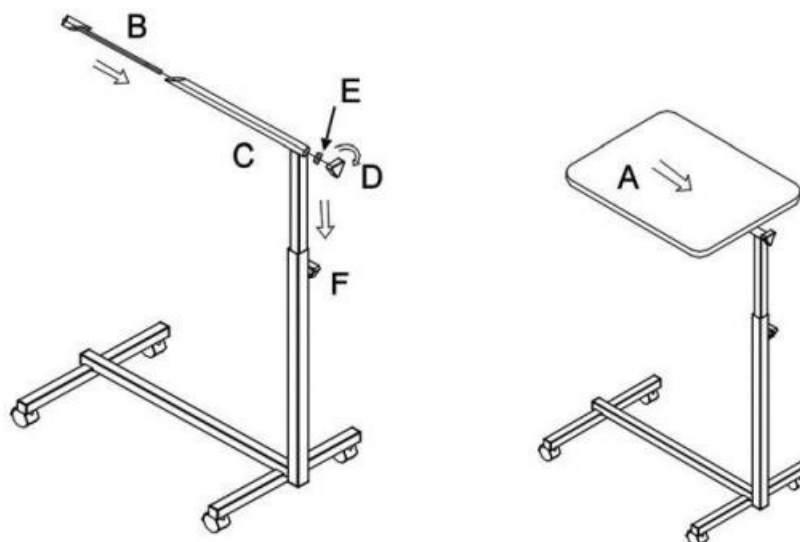

Deslize o painel A dentro do tubo deslizante C e aperte o botão de fixação D.
A altura da mesa pode ser ajustada utilizando o botão de fixação F.
A inclinação da mesa pode ser modificada com o botão de fixação D.
Durante o uso, certifique-se de que os botões de fixação F e D estejam devidamente apertados.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



Se o produto não for bem cuidado e mantido, existe risco de lesões graves.

- Limpe o produto regularmente com água morna, um pano macio e detergente neutro.
- Não utilize produtos de limpeza com fenol ou cloro, pois podem danificar os materiais de alumínio e poliamida.
- Seque com um pano limpo, macio e seco.
- Garanta que não haja acúmulo de sujeira no produto.
- Verifique regularmente o desgaste e a firmeza de todos os parafusos. Troque imediatamente qualquer peça quebrada, danificada ou desgastada.
- Inspeccione com frequência o funcionamento dos freios das rodas e do macaco.
- Em caso de defeito, não tente reparar a mesa por conta própria. Procure um distribuidor autorizado.

TROCA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Antes disso, é fundamental realizar a limpeza e desinfecção conforme as normas de higiene. Ao transferir a mesa, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários para o novo usuário. O produto deve ser inspecionado previamente por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto não puder mais ser utilizado e precisar ser descartado: entre em contato com o seu distribuidor especializado. Se optar por realizar o processo de reciclagem por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para saber as diretrizes de descarte.

ARMAZENAMENTO



Se as condições de armazenamento não forem respeitadas, o produto pode ser danificado e, consequentemente, haver risco de lesões graves.

Não armazene o produto por longos períodos próximo a fontes de calor ou sob exposição ao sol (como atrás de janelas ou perto de radiadores) nem perto de locais muito frios.

Mantenha o produto distante de chamas e faíscas.

Respeite as orientações de armazenamento e empilhamento de seus produtos.

- Guarde em local seco e com temperatura amena
- Proteja o produto embalando-o contra poeira e corrosão (por exemplo, partículas abrasivas, areia, água do mar, ar salino).
- Mantenha todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou identifique-as quando necessário) para evitar que se misturem com outros produtos na remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem peso excessivo (não coloque objetos pesados sobre as peças do produto, não force nada...).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões gerais	Largura 61 x profundidade 41 cm. Largura de passagem 51 cm. Altura ajustável de 70 a 118 cm. Tabuleiro 60 x 40 cm
Estrutura em aço Pintura: acabamento em pó Tampo: placa de poliestireno de alta densidade	

Peso (sem acessórios)	6,1 kg
Peso máximo suportado	25 kg

VIDA ÚTIL

A vida útil estimada deste produto é de 5 anos, considerando uso, segurança e manutenção adequados. Após esse período, o produto pode continuar sendo utilizado, desde que esteja em boas condições.

GARANTIA

Este produto possui garantia de dois anos a partir da data da compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer item que apresente defeito de fabricação, design ou material. Em caso de necessidade de acionamento da garantia, entre em contato com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Danos causados por acidentes, mau uso, alterações ou desgaste natural não estão cobertos pela garantia. Procure o distribuidor responsável para solicitar atendimento.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso máximo autorizado
Peso máximo autorizado
Peso máximo permitido
25 kg