

Finalidade: Carrinho destinado ao suporte e transporte de equipamentos, com placa de fixação para monitor, cesto para arrumação e pega ajustável em altura. Adequado para os modelos MB101, MB201 e MB301.

Características: Material da base: ABS
Rodízios: 3 polegadas, silenciosos
Material da prateleira: Alumínio
Pega: ajustável em altura e bloqueável
Placa de fixação: sistema de encaixe com pino de indexação.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco e cinzento

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: MB101

Marca: Yonker

Dimensões: Dimensões do cesto de arrumação: 28,6 × 12 × 16,6 cm

Altura total: 86cm

Peso líquido: 7,15 kg

Fabricante: Yonker

Morada do fabricante: China

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Realizar regularmente a inspeção do carrinho, verificando a integridade da estrutura, dos componentes e dos elementos de fixação. Verificar também o correto funcionamento e bloqueio dos rodízios, bem como o ajuste e fixação da pega e da placa de fixação do monitor. Manter o produto limpo e armazenado em local seco, limpo e protegido, evitando exposição desnecessária a humidade, poeiras e condições ambientais adversas.

Instruções de Utilização: Antes da utilização, certificar-se de que todas as peças estão corretamente montadas e fixadas. Verificar se a pega está corretamente posicionada e bloqueada na altura pretendida. Garantir que o cesto de arrumação está corretamente encaixado na coluna. Se for utilizado um monitor, assegurar que a placa de fixação está corretamente instalada e bloqueada pelo pino de indexação. Ajustar o ângulo do suporte conforme necessário e confirmar a sua fixação antes da utilização. Durante a deslocação, utilizar a pega para conduzir o carrinho e verificar previamente o estado dos rodízios. Não utilizar o carrinho caso sejam identificados danos, peças soltas ou problemas na estabilidade da estrutura.

Imagens do Artigo:

