


Carrinho
Instruções de instalação

Adequado para: MB101, MB201,
MB301

Versão mais recente: V1.1 Data da última revisão: 01-2026

I. Composição estrutural

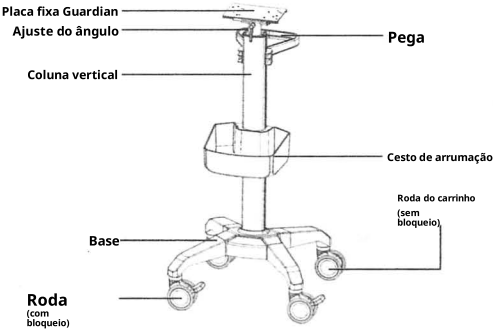


II. Lista de
peças

Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)	Gráfico	Nome da peça	Quantidade (unidades)
	Coluna vertical	1		Pega	1		Parafuso sextavado / M4*18	6		Parafuso PM / M4*12 / ranhura cruzada	4
	Guardian fixo placa	1		Cesto para armazenamento	1		Parafuso sextavado / M4*8	4		Parafuso PM / 3*16 mm / ranhura cruzada / ferro / niquelado	4
	Ajuste ajuste	1		Base	1		Parafuso sextavado / M5*20	4		Coluna de isolamento / 7*4*7 mm/ABS	4
							Parafuso sextavado / M5*40	4		Coluna de isolamento / 7*4*5/nylon	4
							Chave hexagonal / lado oposto de 3 mm	1		Mini chave de fendas cruzada / preta 3,0 cruzada	1
							Chave hexagonal/borda oposta borda de 4 mm	1		Arruela plana / 3 x 10 x 1 mm / ferro/niquelada	4

III. Instruções de montagem


Passo 1: Montar a base

Os rodízios da base não precisam de ser instalados pelo utilizador, pois já vêm montados de fábrica. Quando a base é inclinada horizontalmente, os orifícios para os parafusos na base ficam expostos. Alinhe a coluna com a base e fixe a coluna à base com quatro parafusos hexagonais de cabeça interna M5*40 (conforme ilustrado na Figura 1-1).

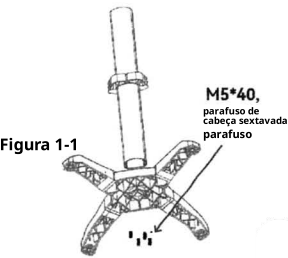

Passo 2: Montar o cesto de arrumação


Alinhe a coluna em forma de T do cesto de arrumação com a ranhura em forma de T do dispositivo de fixação do cesto de arrumação e deslize-a de cima para baixo para a instalação. Ver Figura 2-1

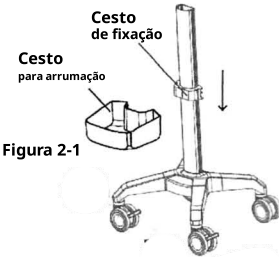

Passo 3: Montar a pega


Primeiro, coloque a pega num dos lados da coluna e, em seguida, instale quatro parafusos de cabeça sextavada M4*8 em ambos os lados da porca de fixação na coluna, conforme ilustrado nas Figuras 3-1 e 3-2. A altura da pega pode ser ajustada e bloqueada.

Nota: A pega deve ser posicionada do lado oposto ao cesto de arrumação!

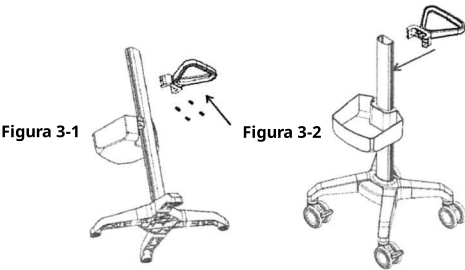

Passo 4: Instalar o ajustador de ângulo

Alinhe a placa de fixação do suporte do ajuste de ângulo com o orifício de parafuso correspondente na coluna e fixe-a com quatro parafusos de cabeça sextavada M5*20, conforme ilustrado na Figura 4-1.

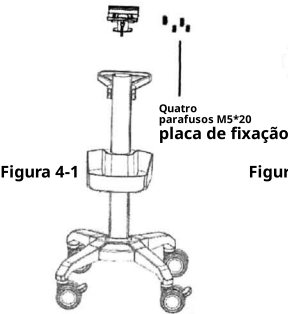

Passo 5: Instalar a placa de monitorização e fixação

1. Primeiro, puxe o pino de indexação do fixador da chapa de monitorização para baixo. Alinhe a placa de montagem de monitorização com o trilho deslizante do fixador e deslize-a na direção da seta, conforme mostrado no diagrama. Por fim, solte o pino de indexação. Por outro lado, para remover a placa de montagem, puxe primeiro o pino de indexação para baixo e, em seguida, deslize-a na direção da seta.

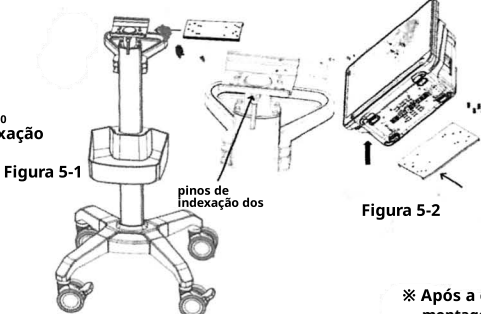


Figura 5-3

2. Antes de instalar a chapa metálica, o monitor deve ser instalado na placa de fixação de monitorização. A operação é a seguinte:

• Alinhe os orifícios dos parafusos na parte inferior monitor com os da placa de fixação de monitorização e fixe-a com quatro parafusos PM cruzados / 194*1.L.

Atenção: Os orifícios para parafusos na parte inferior dos diferentes são diferentes. Os orifícios para parafusos na da tampa metálica abrangem vários modelos de monitores e podem ser selecionados em conformidade.

※ Após a conclusão das cinco etapas de montagem acima, a montagem está concluída, conforme ilustrado na Figura 5-3.