

Finalidade: Almofada ergonómica anti escaras de flutuação de ar com células independentes, com válvulas.

Indicado: Pessoas muito tempo sentadas, com risco elevado de escaras. As células independentes repartem a pressão cutânea, facilitando a circulação sanguínea e prevenindo escaras. Risco de escaras muito Elevado.

Características: Poliuretano e base antideslizante

Dimensões: 38 x 38 x 7 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 103662

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Capa: Pode ser lavado à máquina ou à mão com sabão neutro. Evitar a utilização de líquidos corrosivos. Pode ser desinfetado com cloro. Para remover manchas, não utilizar materiais que possam danificar a almofada. Secar ao ar livre, longe de produtos inflamáveis ou aparelhos quentes. Secar em posição horizontal.

Instruções de utilização:

Esta almofada é entregue já insuflada com uma pressão que é geralmente maior do que a necessária para uma boa utilização. A almofada tem de ser inflada de tal forma que o utilizador esteja sentado a um centímetro de distância da base : se for inferior a isto, a almofada é demasiado solta, se for demasiado alta, a almofada está sobre inflada e pode causar danos.

1. Desaparafusar a proteção da válvula
2. Desaparafusar a válvula com rotação no sentido anti-horário.
3. Apertar para esvaziar, ou utilizar o insuflador de acordo com o que precisa de ser feito.
4. Aparafusar a válvula
5. Aparafusar a proteção

Imagens do Artigo:

