

Finalidade: O CDL558 é uma órtese toracolombar passiva da linha Taylor-Knight, destinada ao controlo dos movimentos da região lombossacra e dorsolumbar, nos planos anteroposterior, lateral e rotacional, proporcionando deslordosamento.

Características: Estrutura: rígida, em material termoplástico. A estrutura estende-se até às primeiras vértebras dorsais. Órtese passiva toracolombar.

Permite adaptação da estrutura à anatomia do paciente, quando necessário.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: CDL558

Marca: EMO

Dimensões: M

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Camino Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior
qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar com **pano húmido e sabão neutro**. Lavar os têxteis à mão, com água até **30 °C**, mantendo os Velcros fechados. Secar à temperatura ambiente, sem utilizar fontes de calor ou engomar. Evitar o contacto com pomadas, cremes, álcool, solventes e outros produtos químicos. As peças plásticas e metálicas devem ser limpas com pano humedecido em água e bem secas, especialmente nas zonas metálicas.
Armazenar à temperatura ambiente, afastado de chamas e fontes de calor.

Instruções de Utilização:

1. Envolver o tronco com o espartilho.
2. Adaptá-lo ao contorno pélvico do paciente.
3. Apertar as cintas de ajuste na parte anterior.
4. A estrutura deve apoiar-se inferiormente sobre os glúteos, o mais baixo possível, sem causar incómodo ao sentar.
5. A parte superior deve apoiar-se na região superior das costas.
6. A estrutura pode ser modificada, quando necessário, para adaptação ao paciente.
7. No modelo Taylor-Knight, as tiras passam sobre os ombros e por baixo das axilas até às costas.
8. Na parte posterior, as tiras cruzam-se e seguem para a parte anterior da cintura, onde são fixadas nas respetivas fivelas.

Precauções de utilização: o ajuste deve ser individualizado e realizado de acordo com as indicações do prescritor ou profissional de saúde.

Imagens do Artigo:

