

LENÇOL SUJEIÇÃO C/ MANGAS 203200

SANITIZED

 GeriMais

Finalidade: Lençol/ Resguardo de sujeição, impede que o utilizador tenha acesso à fralda e sua sujeição. Fornece segurança em caso de risco de vazamento em pacientes com demência senil ou alzheimer.

Características: Manga larga. Para cama com 90 cm. Fecho de correr.

Sanitized – Piqué (50% algodão, 50% poliéster)
Cozido (tecido elástico) – É antialérgico

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 203200

Marca: UBIO

Dimensões: 90x20x190 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind.
Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig,
Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lavável à mão ou à máquina. Temperatura máxima 60°C (branco); Não usar lixívia. Pode ser engomado. Pode ser limpo a seco.

Instruções de Utilização: Evita a manipulação da fralda por parte do utilizador. Recomendado para doentes com doença de Alzheimer ou outras doenças degenerativas que resultam em manipulação indesejada de fraldas, feridas, etc. Recomendado para uso noturno. É utilizado para substituir os imobilizadores tradicionais, tais como os cintos de retenção.

Abra o fecho e coloque a folha de retenção no colchão. A parte do fecho correspondente à parte do utilizador deve permanecer na parte superior da cama. Coloque o utilizador na cama. Coloque os braços do utilizador nas mangas dos resguardos. Feche o fecho da zona do peito do utilizador e nos pés da cama. O resguardo dispõe de um furo para colocar tubos de cateteres ou Drenagens.

Imagens do Artigo:



 GeriMais