

Finalidade:

O cinto abdominal para cadeirão que oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas. Impede o doente de se inclinar, escorregar, ou sofrer de má postura. Proporciona um conforto, derivado às presilhas nas costas, pois evita que o paciente abra sozinho.

Características:

Acolchoamento. 20% camurça (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) – Tecido respirável: 100% poliéster. Cintas 100% polipropileno

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 305651

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

É suficiente lavá-los periodicamente à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 40°C. Secar em posição horizontal sem expor fontes directas de calor, tais como fogões ou aquecedores. Não tolera secadores. Não utilizar lixívia.

Instruções de utilização

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto impede o paciente de se dobrar, escorregar, deslizar e ter má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen, com um fecho de segurança nas costas para evitar que o paciente o abra sozinho.

Imagens do Artigo: