

Finalidade:

Protege a parte anterior do pé e região metatársica, evitando a formação de calos e reduzindo a dor e inflamação na região.

Características:

Desenho anatómico, devido à sua espessura adapta-se facilmente sem rejeições. Almofada em gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando o crescimento bacteriano. 60% lycra, 40% silicone

Lote: Ver embalagem

Cor: Pele

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 802200 – S ; 802205 - L

Marca: UBIO

Dimensões: S

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco se o gel começar a ficar pegajoso. Não expor a fontes diretas de calor.

Instruções de Utilização:

Colocar a banda na parte anterior do pé, tendo o cuidado de pôr a almofada na parte inferior. Usar sempre as almofadas em ambos os pés.

Indicado para metatarsalgia.

Imagens do Artigo: