

+ SEPARADOR DEDOS

Finalidade:

Protege a proeminência do Hallux Valgus (joanete) e alivia a pressão. Reduz a dor por diminuir a pressão e a fricção com o calçado. O seu desenho extrafino não incomoda, nem em sapatos mais estreitos. Graças ao separador, ajuda no alinhamento de dedos por problemas nas articulações metatarso-falângicas causadas por Hallux Valgus. Protege das fricções e helomas (calos) interdigitais.

Características:

Almofada em gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando o crescimento bacteriano.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 805165

Marca: UBIO

Dimensões: Único

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind.
Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig,
Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco se o gel começar a ficar pegajoso. Não expor a fontes diretas de calor.

Instruções de Utilização:

Colocar o protetor na zona proeminente do 1º dedo. Atua como separador, oferecendo proteção contra helomas (calos) e atrito interdigital, auxiliando no alinhamento dos dedos. Protege a área do joanete, diminuindo a dor na protrusão óssea.

Imagens do Artigo: