

### Finalidade:

A cadeira EVASION II é uma cadeira de transporte com rodas manual para pessoas dependentes. Uso interior/externo. O apoio para as pernas está sincronizado durante a reclinção da cadeira. Como todos os produtos INNOV'SA, o encosto, o assento, o apoio para a cabeça e o apoio para os braços estão equipados com um estofamento de conforto macio, removível, fácil de substituir e lavável 30° para reduzir os pontos de pressão.

### Características:

- Componente do enchimento : Revestimento de fibra oca siliconizada para alívio de pressão
- Sistema de travagem de tambor
- Placa de pé duplo
- Revestimento Pvc/Poliuretano em conformidade com o Anti Fire M2.
- Largura de assento: 50 cm
- Altura do solo/ assento : 48 cm
- Dimensão geral: 73 cm (T10)
- Peso da cadeira: +- 38 Kg
- Peso máximo utilizador: 130 Kg

Largura da base do assento	Profundidade da base do assento	Largura total	Altura do assento	Altura total	Peso da cadeira	Utilizador de peso Maxi
						
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	670 mm 670 mm 670 mm 730 mm 790 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg

Tolerâncias dimensionais e de peso ± 15mm / 1,5 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Castanho

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** Evasion II manual

**Regulamento:** 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Fabricante:** Innov'SA

**Morada do Fabricante:** 7 avenue Bernard Pieds  
10110 BAR-SUR-SEINE, França

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -  
qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

A cobertura acolchoada é removível e pode ser lavada a 30 °C. Sugerimos que coloque a colcha num saco de lavagem para proteger a sua aparência original. O tempo de vida esperado da cadeira de rodas depende da utilização, do armazenamento, da manutenção e limpeza regulares. Para manter a sua cadeira de rodas INNOV'SA em bom estado, deve realizar um serviço de manutenção regular da seguinte forma:

- Controle e limpe as rodas. Substitua as rodas quando necessário.
- Controlo da fixação dos parafusos, das pegas e dos botões de regulação.
- Controla os travões.
- Verifique a cadeira (limpeza, fissuras, danos nas peças estruturais, etc.) e limpe-a. Volte a colocar o revestimento quando necessário.

### Instruções de Utilização:

A sua cadeira de rodas só deve ser usada em superfícies onde as quatro rodas toquem no chão e onde haja contacto suficiente para conduzir as rodas de uma forma equilibrada.

É recomendado treinar para uso em superfícies irregulares (pedras de pavimentação, etc.), declives, curvas e para passar obstáculos (passeios, etc.).

Garantir a leitura detalhada do Manual de Instruções.

### Imagens do Artigo:

