

**Finalidade:**

Facilita o movimento de agarrar os objetos por parte de pessoas com mobilidade reduzida;

**Características:**

Pinça e puxador em plástico e haste em alumínio.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto ou azul e cor de Alumínio;

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** AU120/AU121/AU122/AU123

**Dimensões:** AU120 – 67 cm; AU121 - 55cm; AU122 – 71cm; AU123 - 74cm

**Declaração de Conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. Para limpar o produto, utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Se for necessário efetuar a desinfeção do produto, utilize um detergente desinfetante neutro comum.

**Instruções de Utilização:**

Para agarrar o objeto, segure o dispositivo e aproxime-se cuidadosamente do objeto e, em seguida, pressione a alavanca de controlo posicionada na pega. Direcione o objeto para uma superfície segura, coloque sobre a superfície em questão e largue a alavanca de controlo.

**Imagens do Artigo:**