

SACO QUENTE INSTANTÂNEO 13X18CM - ST405 GeriMais

Finalidade:

Para casos de lombalgia, pescoço rígido, reumatismo, hipotermia e sempre que é necessária uma aplicação a quente de forma rápida.

Características:

Magnésio anidro e água;

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Branco e azul;

Caixa: 1 unidade;

Diretiva: 93/42 CEE;

Classificação: Classe IIA;

Modelo: ST405;

Marca: Kyara (Moretti);

Dimensões: 18 x 14 x 1 cm;

Distribuidor: MorettiS.P.A.;

Morada do Distribuidor: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Azerro);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Produto descartável apenas para uso externo. Não quebrar o saco nem provocar a saída do conteúdo. Manter afastado de fontes de calor e substâncias inflamáveis. Manter fora do alcance das crianças. Guarde-o à temperatura ambiente. O conteúdo mancha. Se ingerido, o conteúdo é nocivo. Nesse caso, consultar imediatamente um médico. Não aplicar sobre pele ferida. Antes de usar em bebés, crianças, idosos e pessoas afetadas por diabetes, doenças cardiovasculares e circulatórias ou insensibilidade cutânea (Síndrome de Raynaud) consultar um médico. Em caso de dúvida sobre o tratamento a realizar ou se a sintomatologia persistir, consulte o seu médico.

Instruções de Utilização:

Quebrar a bolha de água interior, apertando o saco com ambas as mãos. em seguida, sacudi-lo de modo a misturar o conteúdo. Aplicar sobre a parte de interesse.

Imagens do Artigo: