

Finalidade:

Tecido deslizante para auxílio para deslizar para tábua de transferência. Os tecidos de transferência ultra-deslizantes permitem mover-se ou endireitar facilmente um paciente acamado sem ter de os levantar. Em forma cilíndrica, a deslocação é feita deslizando da parte superior para a parte inferior: é o próprio tecido que se move e não o paciente, que elimina qualquer risco de dor causado pelo atrito do têxtil.

Características:

100% Nylon autoclavável
Sem limite de peso

Dimensões: 60 x 41 cm

Cor: Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 815085

Marca: Identités

Declaração de conformidade:

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo.

Instruções de utilização:

Em forma cilíndrica, a deslocação é feita deslizando da parte superior para a parte inferior: é o próprio tecido que se move e não o paciente. Rode o paciente (para raios-X, intervenções cirúrgicas, cuidados de pressão de recuperação, mudança de penso ou para a sanita). Um paciente sentado na cama (para alimentar, alívio da dor no peito...)

Mova o paciente para dentro ou para fora da cama, cadeira ou cama de exame sem causar dor nas ancas, ombros, etc.

Imagens do Artigo: