

Finalidade: Compressa Quente e frio concebidas para serem utilizadas na termoterapia ou crioterapia. Arrefecidos no congelador, permanecem maleáveis e pode tratar a dor. Aquecidos num banho maria com água ou no micro-ondas, permitem o relaxamento muscular ou preparação para exercício.

Características:

Compressa composta por gel não tóxico com excelente desempenho e uma bolsa de PVC reforçado ultrarresistente.

Dimensões: 30 x 18 cm

Cor: Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 835129

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpeza efetuada com um pano húmido e pode ser desinfetado com uma solução hidroalcoólica.

Instruções de utilização:

Utilização em Crioterapia:

Coloque a compressa no congelador durante pelo menos 2 horas.

Utilização em Termoterapia:

No micro-ondas: aqueça até 600w durante 45 segundos e aguarde 1 minuto antes de o utilizar.

Se necessário, reaqueça de 10 em 10 segundos até atingir a temperatura pretendida.

Num depósito ou em banho maria: Mergulhe a compressa em água previamente aquecida a 90°C durante cerca de 6 minutos.

Atenção: Não coloque a compressa em contato direto com a pele. Utilize a capa fornecida.

Imagens do Artigo:

