

## MULTI-RESIDENTES

**Finalidade:**

Este sistema de alerta sénior consiste numa base com uma base de receção leve e transportável e 2 pendentes de alerta. Quando um pingente é acionado, a base recebe o sinal, seja na base de carregamento ou com o cuidador em movimento. Alarme sonoro e volume ajustável. Os pingentes adicionais podem ser geminados com a mesma base para vários pacientes (até 45 residentes). Ideal para pequenas estruturas.

**Características:**

Dimensões da base: 5 x 2 x 8,5 cm recarregável pelo cabo USB fornecido;  
Dimensões do pendente: 3,5 x 1,5 x 6 cm alimentado por 1 bateria CR2032 fornecida.  
Distância de operação 100 m sem obstáculo.  
Pingente adicional opcional (819101)

**Dimensões:**

Dimensões da base: 5 x 2 x 8,5 cm  
Dimensões do pendente: 3,5 x 1,5 x 6 cm

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Modelo:** 819200

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

**Instruções de utilização:**

Este sistema, como muitos sistemas de alarme ou chamada doente, consiste em medalhões de chamada e uma caixa de receção.

Funciona localmente.

Os medalhões equipam pacientes ou residentes que provavelmente irão telefonar. A caixa equipa o pessoal encarregado da guarda ou vigilância.

Quando uma pessoa pressiona sua tag, o alerta soa na caixa do receptor indicando o número da tag que foi ativada.

**Imagens do Artigo:**