

**Finalidade:** O Medy Spray proporciona frio instantâneo, muito eficaz no alívio imediato da dor provocada por uma lesão. A anestesia mecânica do frio elimina temporariamente a dor; Causada por pequenas pancadas, luxações, entorses, cefaleias de tensão e picadas de insetos;

**Características:** Este produto é bastante simples de utilizar, no entanto não deve ser aplicado em feridas abertas, em queimaduras ou em membranas mucosas;

**Componentes:** Isobutano propano butano e mentol

**Lote:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Data de produção:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Cor:** Branco e azul;

**Caixa:** 1 unidade;

**Diretiva:** 93/42 CEE;

**Classificação:** Classe 1;

**Modelo:** ST399;

**Marca:** Kyara (Moretti);

**Dimensões:** 20x6 cm;

**Certificado CE:** 5637/CE001/2;

**Fabricante:** MorettiS.P.A.;

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Azerro);

**Importador e Distribuidor:** Gerimais;

**Morada do Importador e Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Evitar a inalação direta do produto e o contacto com os olhos; Manter longe de fontes de calor e/ou faíscas; Manter fora do alcance das crianças; Proteger dos raios solares e não expor a uma temperatura superior a 50º C;

### Instruções de Utilização:

1. Aplicar a uma distância mínima de 15-20 cm da pele e durante um tempo máximo de 3-4 segundo;
2. Suspender a aplicação quando aparecer uma película branca;
3. Se necessário repetir a aplicação.

### Imagens do Artigo:

