



MANUAL DE USUARIO

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUAL DE USUÁRIO

MANUALE UTENTE

[www.ubiotex.com](http://www.ubiotex.com)

## SAPATO PÓS-OPERATÓRIA

PT

### DICAS

Os avanços nas técnicas cirúrgicas, tanto em cirurgia ortopédica e podologia, bem como nos tratamentos e cuidados de úlceras no pé diabético, exigem e / ou permitem a deambulação precoce dos pacientes, sendo os principais benefícios, o paciente recuperar rapidamente a actividade normal e autonomia. Neste sentido, também podemos evitar riscos de embolia pulmonar (trombose pulmonar), originada por longos períodos de imobilidade, após as intervenções a que foi submetido.

É importante iniciar cedo a reabilitação para não perder massa muscular, devido à inactividade.

### INDICAÇÕES

Existem 4 modelos, que cobrem praticamente todas as necessidades solicitadas pelas ciências cirúrgicas, na fase pós-operatória inicial. Podem ser aplicados na sala de cirurgia ou após a cirurgia. Adequados, para cirurgia hallux valgo, martelo, fascite plantar, entre outros. São também usados, para o tratamento de úlcera no pé diabético.

Dependendo da patologia recomenda-se um modelo de sapato. A saber:

Sapato Pós-Cirúrgico: Hallux valgus, Hallux rigidus, dedos em garra, Onicocriptose (unha encravada), Exostose, osteopatias metatarsais.

Sapato Pós-Cirúrgico Tacão: adiciona ao modelo anterior a especificidade de aplicação em úlceras plantares e nos casos em que seja necessário descarregar a pressão, apoiar e dar mobilidade ao ante pé.

Sapato Pós-Cirúrgico Cunha invertida: Fascite plantar, úlceras, infecções, tratamentos traumatológicos e processos pós-cirúrgicos do calcanhar. Reduz a pressão e distribui o peso no ante pé.

Sapato Pós-Cirúrgico Taco: Indicado para intervenção nas falanges e hallux. O seu desenho evita a carga no ante pé concentrando todo o apoio no calcanhar devido ao acolchoado interior.

### INSTALAÇÃO

Recomenda-se indicação médica sobre o tipo de sapato a usar, a fim de otimizar as características dos mesmos. A sua colocação inicial deve ser supervisionada, para formação da utilização correcta por parte do paciente e prestadores de cuidados qualificados.

Importante:

Fácil manuseamento com uma mão; Ambidestro; sistema de fecho de velcro; Suela antiderrapante; material respirável.

## SAPATO PÓS-OPERATÓRIA

PT

### LIMPEZA / DESINFECÇÃO



Deve ser lavado com sabão neutro. Deixar secar ao ar livre, em zona sombreada.

### SEGURANÇA

Verifique se o sapato encaixa correctamente, dimensioná-lo à patologia sofrida.

### PRECAUÇÕES

Proibida a utilização de substâncias cáusticas, decapantes, solventes e “objectos cortantes”  
Examinar regularmente o sapato e o seu normaldesgaste (buraco, fendas, modificação da aparência da superfície, etc.)

### CUIDADOS DE MATERIAIS

Evitar o contacto directo e prolongado de líquidos e da humidade.  
Realizar regularmente uma verificação visual do sapato.

### CONSERVAÇÃO

Armazenar numa superfície plana, protegendo a sua exposição à luz natural e humidade.

### ELIMINAÇÃO

Não queimar. Colocar no recipiente de residuos apropriado.

### GARANTIA

La producto garantia legal é de 2 anos a partir da data da factura de compra pelo distribuidor.  
A garantia não cobre o desgaste normal do produto.  
Entre em contato com o revendedor se a incidência.

### VIDA DO PRODUTO TERMO

1 ano

### COMPOSIÇÃO

Poliéster; nylon; EVA.



## EUROPEAN MANUFACTURER

POSTQUIRÚRGICO / POST-SURGICAL  
POST-OPÉRAIOIRE / PÓS-CIRÚRGICO  
POST-OPERATORIA

REF.	SIZE	
802300	34-36	
802305	37-38	
802310	39-41	
802315	41,5-43	
802320	43,5-45	

CUÑA TALO / WEDGE TALO  
COIN TALO / CUNHA TALO  
CUNEO TALO

REF.	SIZE	
802325	34-37	
802330	37,5-39,5	
802335	40-42	
802340	42,5-44,5	
802345	45-47	

**bio**  
qualitylife

CUÑA INVERTIDA / WEDGE INVERTED  
COIN INVERSÉ / CUNHA INVERTIDA  
CUNEO INVERTITO

REF.	SIZE	
802350	34-37	
802352	37,5-39,5	
802354	40-42	
802356	42,5-44,5	
802358	45-47	

TACO / WAD  
BOURRE / CHUMAÇO  
TACO

REF.	SIZE	
802370	34-37	
802372	38-40	
802374	41-43	
802376	44-46	

