

APARELHO PRESSOTERAPIA LTM560

E ACESSÓRIOS: LTM563-S/LTM563-L/LTM566-S/LTM566-L/ LTM566-XXL/ LTM569-S / LTM569-L / LTM568

Finalidade: A terapia por compressão avançada é um dispositivo destinado a doentes que necessitam de uma drenagem linfática nos membros, ou seja, aumenta a drenagem dos linfonodos de áreas congestionadas, facilitando a capacidade natural do organismo de eliminar toxinas. A pré-terapia é uma massagem linfática que opera na circulação venosa e linfática. Seu propósito é normalizar a circulação venosa, evitando estase linfática e aumentando a microcirculação periférica.

Características:

Pressão: 20 – 250mmHG; Tempo de ciclos 10 – 20 – 30 min.; 4 canais de saída; Normas técnicas: EN 60601-1 ; EN 60601-1-2 ; EN 60601-1-11.

| | Braço LTM563-S | Braço LTM563-L |
|-------------------|----------------|----------------|
| Tamanho | S/M | L/XL |
| Material | TPU | TPU |
| Número de câmaras | 4 | 4 |
| Dimensões | 70 x 25 cm | 90 x 25 cm |
| Circunferência | 50 cm | 50 cm |

| | Perna LTM566-S | Perna LTM566-L | Perna LTM566 - XXL | Perna LTM566 – 3XL |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Tamanho | S/M | L/XL | XXL | XXXL |
| Material | TPU | TPU | TPU | TPU |
| Número de câmaras | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensões | 90 x 30 cm | 110 x 30 cm | 90 x 40cm | 110 x 36 cm |
| Circunferência | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 72 cm |

| | Extensão LTM568 | Cintura LTM569-S | Cintura LTM569-L |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Material | TPU | TPU | TPU |
| Número de câmaras | - | 4 | 4 |
| Dimensões | 100 x 10 cm | 120 x 40 cm | 145 x 40 cm |

Peso: 2,6kg

Cor: Cinzento e azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe IIa

Modelo: LTM560 – Aparelho.

Braços: LTM563-S; LTM563-L;

Pernas: LTM566-S; LTM566-L; LTM566-XXL; LTM566-3XL;

Cintura: LTM-568; LTM569-S; LTM569-L ;

Marca: LEM

Dimensões: 26x17x13cm

Certificado CE: DD 60148746v0001

Fabricante: Xiamen Senyang Co Ltd

Morada do fabricante: 4/F, Xingbei Industry, No.95-99, West 2 Road, Jiu Tian Hu, Xing Lin, Xiamen, 361022, China

Mandatário Europeu: Moretti S.p.A.

Morada do Mandatário Europeu: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

No que se refere à segurança dos doentes e dos médicos, recomendamos que o fabricante ou o laboratório aprovado procedam a uma verificação do dispositivo de dois em dois anos. Em caso de reparação, utilizar apenas peças sobressalentes e acessórios originais.

Limpeza: Para a unidade da bomba utilize apenas um pano húmido. **Não** mergulhe o dispositivo em água.


Vestuário: Para uma melhor conservação, recomenda-se que o vestuário seja totalmente esvaziado após cada utilização. Não dobre muito as roupas. Para limpar a estrutura, utiliza-se uma solução de álcool e sabão neutro (em partes iguais) misturada com água.

Instruções de Utilização:

1. Introduza a ficha numa tomada de corrente standard de 220 V.
2. Ligue a tubagem de ar à saída de ar da unidade e ao vestuário. Verifique se todas as conexões estão bem conectadas.
3. a. Inicialização/manga: ligar a tubagem de ar ao vestuário de acordo com a sua lama: o tubo curto deve estar ligado à extremidade da bota ou da manga próxima da bomba e ao tubo mais longo até ao mais distante. Ligue as extremidades dos tubos com os mesmos conectores de cor (cor-de-rosa, amarelo, roxo, azul claro).
b. Banda abdominal: ligar os tubos às câmaras. Preste atenção para não cruzar os tubos. Ligue o conector aos tubos e à bomba.
4. Não usar: vigia, anéis e pulseiras.
5. Coloque o vestuário no membro a ser tratado. O paciente deve se sentir confortável. Feche firmemente o zip ou o Velcro (banda abdominal). O paciente pode se sentir mais confortável não apertar demais o vestuário, sempre selecionando o nível de pressão da bomba indicado pelo médico.



Imagens do Artigo:

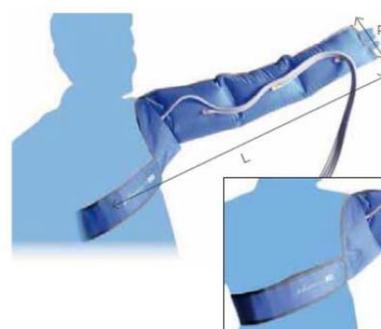

Chiusura a strappo con velcro regolabile