

Finalidade: A pedaleira é um dispositivo médico destinado a pessoas com dificuldades de mobilidade e é indicada para restaurar a coordenação e massa muscular dos membros superiores e inferiores;

Características: Está equipado com quatro pontas antiderrapantes, pedais com alças ajustáveis, botão de regulação de intensidade, ecrã;

Lote: Referido na embalagem ou na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem ou na etiqueta do artigo;

Cor: Preto;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: RP926;

Marca: Mopedia (Moretti);

Dimensões: 49x37x34 cm;

Fabricante: Moretti S.p.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 -Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Em seguida, seque bem antes de usar. Não utilize jatos de água diretos; Utilize água a uma temperatura não superior a 30 °C; Não utilize máquinas de fundição de água e/ou vapor;

Instruções de Utilização:

1. Certifique-se de que todos os parafusos estão completamente apertados antes da utilização;
2. Coloque o produto permanentemente e sobre uma superfície plana;
3. O posicionamento da pedaleira no que diz respeito à altura do assento deve ser de modo a permitir o relaxamento total do membro inferior;
4. Inicie a atividade apenas quando estiver na posição do tronco quase ereto;
5. Não retire os pés dos pedais enquanto a placa de pedal estiver em movimento;
6. No final da utilização, rode o botão de regulação do travão no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão e evitar que os pedais rodem livremente.

Imagens do Artigo:

