

Finalidade: Facilitar/permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por condução autónoma ou com a ajuda de outra pessoa;

Características:

Estrutura dobrável em alumínio com revestimento em pó epóxi anti-ferrugem, barra transversal única, assento e encosto em nylon preto, almofadado e lavável, bolso para documentos no verso, assento e encosto em nylon preto, acolchoado e lavável, bolso para documentos na parte de trás. Rodas traseiras de alumínio de libertação rápida, com pneus de PU preto sem câmara interior e corrimão de aço pintado de preto. Rodas dianteiras em PVC preto com garfo de aço. Travão de estacionamento de alumínio. Painel lateral de protecção do vestuário com apoios de braços dobráveis e removíveis com apoio de PU. Placas para pés dobráveis, removíveis, ajustáveis em comprimento com apoios para pés e correia de calcanhar de plástico preto separados.

Largura do assento: 43 cm;

Peso: 15,6 Kg

Peso máximo suportado 120Kg

Dimensões máximas: 104 x 90,5 x 62 cm

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Estrutura em azul;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: CP770-43;

Marca: Ardea (Moretti);

Fabricante: Moretti S.p.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Armazenamento: Guardar num local seco, longe de fontes diretas de calor, como a luz solar. Temperatura recomendada: entre +10 C°/ + 40 C°;

Manutenção: O estofos, partes metálicas e as rodas podem ser limpos com água e sabão neutro, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação. Atenção à secagem das rodas, pode ser perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas;

Instruções de Utilização:

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas;
3. Lembre-se que o centro de gravidade da cadeira de rodas foi estudado com apoios para os pés na posição correta, pelo que não utilize a cadeira de rodas sem os apoios para os pés porque pode virar.

Imagens do Artigo:

