

Finalidade: Otoscópio Clínico. Instrumento de alta qualidade, fiável e muito resistente. Para o diagnóstico do nariz, da garganta e das orelhas.

Características: Otoscópio de alta qualidade com lâmpada halógeno Xenon, Brilho 24Lúmen. 2.5V. Construído em plástico sólido e leve, com guarnição de metal.

Cor: Azul

Caixa: Sim

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: DMV540B

Marca: DIMED

Dimensões: 24 x 37 x 165 mm

Certificado de Conformidade: directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpe a superfície do dispositivo com pelo menos 75% de solução de álcool uma vez por semana, evitando a lupa na cabeça.

O uso de detergentes corrosivos não é recomendado. Os espelhos do otoscópio podem ser esterilizados em autoclave por 20 minutos a 134 ° C.

Instruções de Utilização: Selecione um espelho adequado para o canal auditivo do paciente e aplique na cabeça do otoscópio (geralmente o espelho de 4 mm é para adultos e o espelho de 2,4 mm é para crianças); Insira a ponta do otoscópio na orelha do paciente para realizar o exame médico. FIG.3) Se necessário, use também a lupa na cabeça (3x a ampliação possível);

Imagens do Artigo:

