

CADEIRA SANITÁRIA

APOIO BRAÇOS REBATÍVEIS

RP783

 GeriMais

Finalidade: A cadeira é um instrumento de ajuda para o banho e duche, indicados para pessoas com mobilidade reduzida.

Características: Estrutura de Alumínio anodizado (regulável em altura), assento em PVC e ponteiros em Borracha antiderrapante;
Funções: Estabilizador para subir para a tomar banho, suporte durante o banho, cadeira de sanita, suporte para sanita e assento para duche.

Dimensões: Base: 53x40x46 cm; altura do assento 40 a 58cm, altura do apoio de braço: 60 – 78cm

Peso Máximo de utilizador: 130kg;

Cor: Branco e alumínio;

Data de produção e Lote: Referido no artigo;

Embalagem: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe I;

Modelo: RP783;

Marca: Moretti;

Fabricante: Moretti S.P.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e Limpeza: Os dispositivos da linha **MOPEdia** by Moretti, na altura da sua colocação no mercado, são cuidadosamente examinados e marcados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos. Para limpar utilize água morna e um sabão neutro. Seque com um pano.

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies metálicas;

Instruções de Utilização: Ao sentar-se, distribua sempre o peso por todo o assento. Não se sente carregando o peso só de um lado. Para se levantar e manter o equilíbrio, apoie-se sempre em ambos os apoios de braços.

No caso de utilização da cadeira por pessoas com deficiências motoras particulares, ajudá-las sempre a sentar e levantar.

Imagens do Artigo:



 GeriMais